

แนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาด Laryngoscope

โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

1. Laryngoscope blade

1. นำ Blade ที่ใช้แล้วไปล้างเพื่อเอาคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน
2. ใช้แปรงขนนุ่มขัดให้ทั่ว Blade ด้วยน้ำ 4% Chlorhexidine scrub แล้วล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาดที่ไหลจากก๊อกน้ำ แล้วเช็ดให้แห้ง
3. เช็ดด้วย 70% alcohol ทิ้งให้แห้ง
4. เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การทำความสะอาดด้ามจับ laryngoscope (Laryngoscope handle)

1. ให้ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน เช็ดด้ามจับด้วยผ้าปิดหมาดที่ผสมน้ำผสมผงซักฟอก เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง
2. เช็ดด้วย 70% alcohol เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว
3. แล้วเก็บ Tray ที่สะอาด ปิดสนิท

* ถ้าไม่ได้ใช้ ให้นำ Laryngoscope blade มาทำความสะอาด โดยเช็ดด้วย 70% alcohol อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน และเปลี่ยนถุงที่ใส่ Tray ทำล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก แล้วเช็ดให้แห้ง ทุกครั้งที่มีการใช้งาน หรือทุก 1 เดือน

แนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาด Laryngoscope

โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

1. Laryngoscope blade

- นำ Blade ที่ใช้แล้วไปล้างเพื่อเอาคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน
- ใช้แปรงขนนุ่มขัดให้ทั่ว Blade ด้วยน้ำ 4% Chlorhexidine scrub แล้วล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาดที่ไหลจากก๊อกน้ำ แล้วเช็ดให้แห้ง
- เช็ดด้วย 70% alcohol ทิ้งให้แห้ง
- เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การทำความสะอาดด้ามจับ laryngoscope (Laryngoscope handle)

- ให้ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน เช็ดด้ามจับด้วยผ้าปิดหมาดที่ผสมน้ำผสมผงซักฟอก เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง
- เช็ดด้วย 70% alcohol เก็บใส่ถุงซิปล็อค หรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว
- แล้วเก็บ Tray ที่สะอาด ปิดสนิท

**ถ้าไม่ได้ใช้ ให้นำ Laryngoscope blade มาทำความสะอาด โดยเช็ดด้วย 70% alcohol อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน และเปลี่ยนถุงที่ใส่ Tray ทำล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งที่มีการใช้งาน หรือทุก 1 เดือน

